


# 产品结构

PRODUCT STRUCTURE

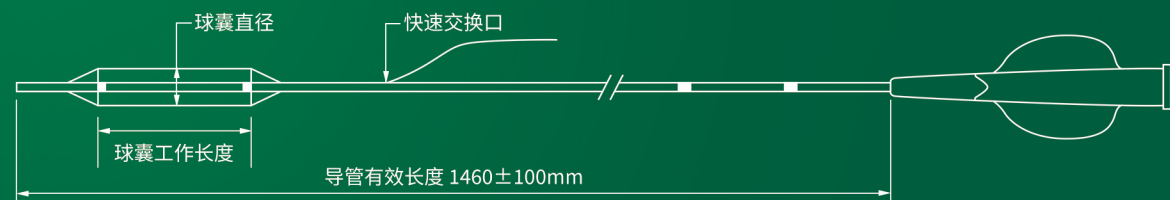

# 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

规格型号:

球囊工作长度 mm	球囊直径/mm									
	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50
6	✓	✓	✓	✓						
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25						✓	✓	✓	✓	✓

颅内球囊扩张导管推荐扩张压力:

名义压力NP 额定爆破压RBP\*

扩张压力 atm	球囊直径/mm									
	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50
1.0/101	1.15	1.62	1.85	2.07	2.29	2.51	2.76	2.99	3.46	3.91
2.0/203	1.30	1.78	2.01	2.24	2.47	2.70	2.95	3.19	3.66	4.12
3.0/304	1.38	1.86	2.10	2.33	2.56	2.81	3.06	3.30	3.78	4.25
4.0/405	1.43	1.92	2.16	2.41	2.65	2.89	3.14	3.39	3.87	4.35
5.0/507	1.47	1.97	2.21	2.46	2.71	2.95	3.20	3.45	3.94	4.43
6.0/608	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50
7.0/709	1.52	2.02	2.27	2.53	2.78	3.04	3.29	3.59	4.05	4.56
8.0/811	1.54	2.04	2.29	2.55	2.81	3.07	3.32	3.63	4.10	4.62
9.0/912	1.56	2.06	2.31	2.58	2.84	3.10	3.36	3.67	4.15	4.69
10.0/1013	1.57	2.08	2.34	2.60	2.87	3.13	3.40	3.71	4.21	4.75
11.0/1115	1.59	2.10	2.36	2.62	2.90	3.16	3.44	3.75	4.27	4.81
12.0/1216	1.60	2.12	2.38	2.65	2.93	3.19	3.48	3.79	4.33*	4.88*
13.0/1317	1.62	2.15	2.41	2.68	2.96	3.23	3.52	3.83	4.39	4.96
14.0/1419	1.64*	2.17*	2.44*	2.71*	2.99*	3.26*	3.56*	3.87*	4.45	5.03
15.0/1520	1.66	2.20	2.47	2.74	3.02	3.29	3.60	3.91	4.52	5.12
16.0/1621	1.68	2.23	2.50	2.77	3.05	3.33	3.64	3.95	4.59	5.21

\* 该产品适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。颅内动脉包括：基底动脉，大脑中动脉，颈动脉颅内段和椎动脉颅内段。



# 中天天巡™球囊扩张导管

## Zenith Intracranial Balloon Dilatation Catheter

国械注准 20233030479



苏州中天医疗器械科技有限公司

地址：苏州工业园区车坊东堰里路21号生物医药产业园5期6号楼5层  
 电话：86-0512-69138730  
 邮箱：Information@zenithmedtech.com  
 网址：Zenithmedtech.com

创新科技 让血管治疗更简单

# 天巡™球囊扩张导管

灵巧如蛇，精准扩张

## 01 远端250mm超长亲水涂层

- 专利亲水涂层，降低与血管和病变的摩擦，极大提高导管的通过性。

### 产品参数

PRODUCT PARAMETERS

导管设计 半顺应性快速交换型球囊扩张导管

最大兼容导丝 0.014inch


适配导引导管 5F以上

导管有效长度 146cm

### 测试结果

TEST RESULT

球囊卸压时间测试

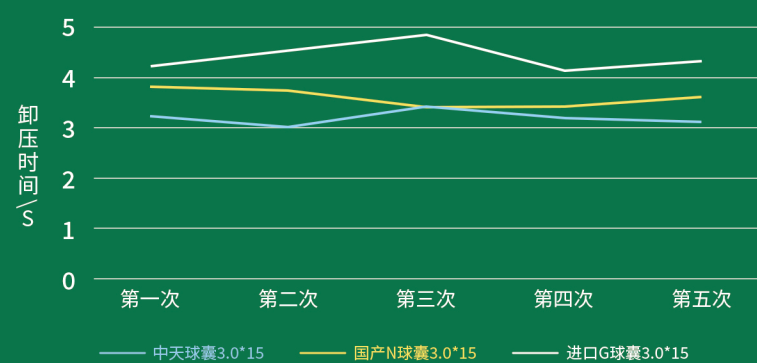

## 02 优异通过性

- 激光焊接工艺，0.0165"头端外径，头端与球囊过渡更加平滑；
- 球囊轻薄，通过外径极低；
- 超滑涂层，降低摩擦，助力通过病变部位；
- 锥形管身过渡顺滑，抗打折扭结。

## 03 精准扩张

- 半顺应性球囊，逐级扩张，安全有效。

## 04 近端海波管推送杆

- 提供优异的推送性；
- 涂覆亲水涂层减少摩擦；
- 90cm和100cm近端标记更好提示临床操作。

## 05 易操作

- 快交口设计，迅捷有效开通病变；
- 更长有效长度，可搭配多种器械使用，效果更佳。